



Ceramosonic S

Schnelle und schonende Keramikverdichtung Durch Ultraschall

Die Qualität und ästhetische Wirkung keramischer Restaurationen lässt sich entscheidend durch eine gezielte Kondensierung der Schichtung erhöhen.

Der **Ceramosonic S** erzeugt hochfrequente Schwingungen und ermöglicht dadurch eine optimierte Verdichtung feuchter Keramikpartikel.

Im Vergleich zur manuellen oder mechanischen Verdichtung verhindert die Anwendung des Ultraschallkondensators eine schnelle Trennung der groben und feinen Keramikpartikel. Sie haben eine bessere Kontrolle während der Aufbauphase.

- ✓ Die Ultraschallschwingungen (28.000 Schwingungen/Sek.) unterstützen die Tiefenwirkung der Keramik, entfernen eventuelle Lufteinschlüsse und erhöhen die physikalische Dichte. Eine höhere Materialdichte gewährleistet eine geringere Schrumpfung beim Brand, einen besseren Verbund zum Metall- und Vollkeramikgerüst sowie eine erhöhte Farbtiefe in Verbindung mit einer dichteren Oberfläche und großer mechanischer Festigkeit.
- ✓ Brillantere Farben durch Reduktion von Lufteinschlüssen
- ✓ Identische Wärmeleitung der Schichtmasse zum Vollkeramikgerüst
- ✓ Höhere Verbund auf metallkeramischen- und vollkeramischen Gerüsten
- ✓ Zeitersparnis durch weniger Korrekturbrände
- ✓ Bessere Kontrolle während der Aufbauphase
- ✓ Höhere interne Festigkeit der Schichtkeramik



Einführungspreis

€ 512,-

Preise sind **gültig vom 15.11.07 – 31.12.07** und verstehen sich zuzügl. ges. MwSt. excl. Porto und Verpackung. Bei Zahlung innerhalb 8 Tagen 2% Skonto, 30 Tage netto.

IMPRESSUM:

Herausgeber:
Wollner Dental GmbH
Gerd Wollner
Erlenstraße 36
90441 Nürnberg

www.wollner-dental.de

Tel: 0911 638031
Fax 0911 6383978
e-mail: info@wollner-dental.de

Geschäftsführer: Gerd Wollner
Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 1335 45242
Handelsregister-Nr.: 6636

HAFTUNGSHINWEIS:

Die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen beruhen auf Quellen, die Wollner-Dental für zuverlässig hält. Dennoch ist die Haftung für Schäden, die aus der Heranziehung der Informationen für die eigene Kaufentscheidung des Lesers möglicherweise resultieren können, ausgeschlossen.

Sollten Sie unseren Newsletter nicht mehr erhalten wollen, so genügt eine einfache Mail mit dem Vermerk „Newsletter abbestellen“ an info@wollner-dental.de

